

Leistungsverzeichnis für Pankreatische Elastase 1 im Stuhl

Bezeichnung:	Pankreatische Elastase 1 im Stuhl
Synonyme:	Elastase 1, E1
Zuordnung:	Stuhldiagnostik
Probenmaterial und Mindestmenge:	mind. bohngroße Stuhlprobe (befüllter Stuhllöffel) im Standard-Stuhlröhrchen
Abnahmehinweise:	Stuhlfänger verwenden; Anleitung zur Stuhlentnahme (auf Stuhlfänger aufgedruckt) beachten; Probenkontamination mit Wasser aus dem WC ist zu vermeiden.
Probenentnahmesets:	Versandset Stuhl
Probentransport:	Postversand möglich; Probe bitte umgehend nach der Entnahme versenden. Maximale Transportdauer 7 Tage.
Klinische Indikation:	Diagnose/Ausschluss einer exokrinen Pankreasinsuffizienz, Diagnose/Ausschluss einer Pankreasbeteiligung bei Oberbauchschmerzen, Verdauungsbeschwerden od. Osteoporose Verlaufskontrolle von Patienten mit leichter exokriner Pankreasinsuffizienz
Methode:	ELISA;
Referenzbereich:	≥ 200 µg E1/g Stuhl
Ansatztage:	täglich
Beurteilung:	≥ 200 µg E1/g Stuhl: Normale exokrine Pankreasfunktion 100 bis < 200 µg E1/g Stuhl: Leichte/mittlere exokrine Pankreasinsuffizienz < 100 µg E1/g Stuhl: Schwere exokrine Pankreasinsuffizienz Die quantitative Bestimmung der Pankreatischen Elastase 1 im Stuhl weist eine Sensitivität von 95% für die Diagnose der exokrinen Pankreasinsuffizienz auf und erfasst im Vergleich zu anderen Verfahren auch leichte und mittelschwere Fälle.
Informationsmaterial:	Fachbroschüre KyberPlus
Begleitdokumente:	Ø
Bemerkungen:	Ø