

## Leistungsverzeichnis für sekretorisches IgA im Stuhl

<b>Bezeichnung:</b>	<b>sekretorisches IgA im Stuhl</b>								
<b>Synonyme:</b>	slgA								
<b>Zuordnung:</b>	Stuhldiagnostik, Entzündungsmarker								
<b>Probenmaterial und Mindestmenge:</b>	mind. bohngroße Stuhlprobe (befüllter Stuhllöffel) im Standard- Stuhlröhrchen								
<b>Abnahmehinweise:</b>	Stuhlfänger verwenden; Anleitung zur Stuhlentnahme (auf Stuhlfänger aufgedruckt) beachten; Probenkontamination mit Wasser aus dem WC ist zu vermeiden.								
<b>Probenentnahmesets:</b>	Versandset für „Stuhl“								
<b>Probentransport:</b>	Postversand möglich, Probe wenn möglich, direkt nach der Entnahme versenden. Maximale Transportdauer 3 Tage.								
<b>Klinische Indikation:</b>	Allergische Erkrankungen, erhöhte Infektanfälligkeit, Inflammatorische Prozesse im Darm, Autoimmunerkrankungen								
<b>Methode:</b>	ELISA								
<b>Referenzbereich:</b>	510 - 2040 µg/ml Stuhl								
<b>Ansatztage:</b>	3 - 4 x wöchentlich								
<b>Beurteilung:</b>	<table><tr><td>&lt; 250 µg/ml</td><td>deutlich vermindert</td></tr><tr><td>250 - 509 µg/ml</td><td>vermindert</td></tr><tr><td>510 - 2040 µg/ml</td><td>normal</td></tr><tr><td>&gt; 2040 µg/ml</td><td>erhöht</td></tr></table> <p>Erniedrigte Werte finden sich häufig bei verminderter Immunabwehr. Erhöhte Werte gehen oft mit Entzündungen einher.</p>	< 250 µg/ml	deutlich vermindert	250 - 509 µg/ml	vermindert	510 - 2040 µg/ml	normal	> 2040 µg/ml	erhöht
< 250 µg/ml	deutlich vermindert								
250 - 509 µg/ml	vermindert								
510 - 2040 µg/ml	normal								
> 2040 µg/ml	erhöht								
<b>Informationsmaterial:</b>	Fachbroschüre - KyberPlus								
<b>Begleitdokumente:</b>	Ø								
<b>Bemerkungen:</b>	In Verbindung mit der Untersuchung anderer Stuhlparameter ist zu beachten, dass sich die Mindestmenge an Probenmaterial ggf. erhöht.								